

**BRUKSANVISNING**  
**Revaxør® ørevoksløsende**  
**øredråper**

**Bruksområde**

Revaxør øredråper løser opp ørevoks.

**Ikke bruk Revaxør**

- dersom øret er betent eller smertefullt
- dersom det væsker fra øret
- dersom ørets trommehinne er skadet, perforert eller har vært punktert (f.eks. dren)
- dersom du er allergisk (overfølsom) ovenfor noen av innholdsstoffene i Revaxør

**Særskilte brukergupper**

Dersom du har koordinasjonsproblemer, bevegelsesvansker eller skjelvende hender bør du be noen om hjelp til å dryppe Revaxør øredråper inn i ørekanalen din og til å skylle øret i etterkant, slik som beskrevet i bruksanvisningen.

**Barn**

Revaxør skal kun brukes hos barn etter legens anvisning. Følg bruksanvisningen nøye. Kontakt lege eller sykepleier dersom det er behov for øreskylling hos barn.

**Brukere av høreapparat**

Dersom du bruker høreapparat, må du vente med å sette tilbake høreapparatet til etter at øret er skylt og vannet har rent ut.

**Mulige bivirkninger**

I enkelte sjeldne tilfeller har lokal allergisk reaksjon oppstått etter bruk av Revaxør. Ubehaglig følelse i ørekanalen, hudirritasjon og forbigående svimmelhet kan oppstå. Tinnitus kan være et symptom på vokspropper, og forbigående tinnitus kan oppstå etter rens av ørene.

Ørets trommehinne kan skades dersom skylleballongen føres for dypt inn i ørekanalen.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger av Revaxør.

For å rapportere enhver alvorlig hendelse, kontakt produsenten og myndighet (Markedsovervåking av medisinsk utstyr, Tlf. +47 22 89 77 00) i landet hvor brukeren er. Dette er viktig for den pågående overvåkingen av nytte/risikoforholdet til produktet.

**Slik bruker du Revaxør øredråper og skylleballong**

**Oppløsning av vokspropp med øredråper**

- Varm flasken i hånden i et par minutter slik at innholdet får kroppstemperatur (ca. 37°C).
- Legg hodet på siden og drypp 10-20 dråper Revaxør inn i øret. Trekk øreflippen forsiktig opp og ned et par ganger, i en sirkulær bevegelse. Dekk til ytterst i øret med litt bomull som fuktes med noen dråper Revaxør.
- La Revaxør virke i 20 – 60 minutter. Ved behov kan du la Revaxør virke over natten.

Etter bruk av Revaxør øredråper må øregangen skylles. Du kan bruke Revaxør skylleballong, eller ta kontakt med lege eller sykepleier for øreskylling. Spesielt hos barn anbefales det at øreskylling utføres av lege eller sykepleier.

**Øreskylling med skylleballong**

- Skylleballongen skal rengjøres før hvert bruk.
- Sug opp lunkent vann i skylleballongen.
- Putt spissen på skylleballongen noen millimeter inn i øregangen og skyll øret ved å klemme rolig og forsiktig på skylleballongen.

**Putt ikke spissen på skylleballongen dypt inn i ørekanalen!**

- Gjenta behandlingen noen ganger til skyllevannet er helt rent.
- Rengjør skylleballongen og klem den tom etter hver behandling. La den stå med spissen ned, slik at de siste dråpene renner ut.

Hvis ikke ørevoksproppen løses opp, kan du gjenta behandlingen i tre påfølgende dager ved behov.

Husk å skylle øret med vann fra skylleballongen etter hver behandling. Vennligst følg instruksjonene fra lege eller sykepleier, dersom du har oppsøkt helsepersonell for øreskylling.

**Bruk av Revaxør skal ikke være smertefullt. Dersom du får smerter må du avslutte øreskylling og kontakte lege.**



Unngå kontakt med øynene. Skyll øynene med rikelig mengder vann ved behov og kontakt lege.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av Revaxør.

**Innhold**

Allantoin (3 mg/ml), lanolin etoksyliert, polysorbat 80, polysorbat 60, sorbitol flytende, fruktosesirup, polyoksyetylenstearyleter, polyoksyetylenoleyeter, lanolinolje, isopropylmyristat, riskliolje (Oryza Sativa), fenetylalkohol, cetylalkohol, butylhydroksytoluen, sorbinsyre, bensetonklorid, vann.  
Skylleballong: Polyvinylklorid (PVC)

**Oppbevaring**

Oppbevares ved høyst 25 °C. Oppbevar Revaxør øredråper og skylleballongen utilgjengelig for barn. Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Produktet skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Restene skal leveres til apoteket. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

**Pakningsstørrelser**

Revaxør øredråper 10 ml  
Revaxør øredråper 10 ml med skylleballong

**Tillvirker**

Revaxør:  
Orion Corporation  
Orionintie 1  
FI-02200 Espoo  
Finland



**Skylleballong:**

Albert Hohlkörper GmbH & Co. KG  
Maerkische Strasse 35  
58675 Hemer  
Tyskland



**Distributør i Norge**

Orion Pharma AS

**Besøksadresse**

Sandakerveien 130  
NO-0484 Oslo  
Norge

**Postadresse**

P.O.Box 4366 Nydalen  
NO-0402 Oslo  
Norge

Tel. +47 4000 4210

www.orionpharma.no

**Denne bruksanvisning ble sist oppdatert**

31.10.2023



Medisinsk utstyr



Les bruksanvisningen før bruk



Advarsel



Tilvirker



Tilvirkningsland



Distributør



Oversettelse



+25 °C  
Øvre temperaturgrense



Bruk innen



Batch